


HIGIENIZAÇÃO - CORTINAS DIVISÓRIAS HIGI FÁCIL

Para maior durabilidade e aproveitamento da sua cortina divisória de leito hospitalar em VINIL HIGI FÁCIL, é imprescindível que os procedimentos de lavagens que constam na etiqueta e reproduzidos abaixo, sejam seguidos corretamente.

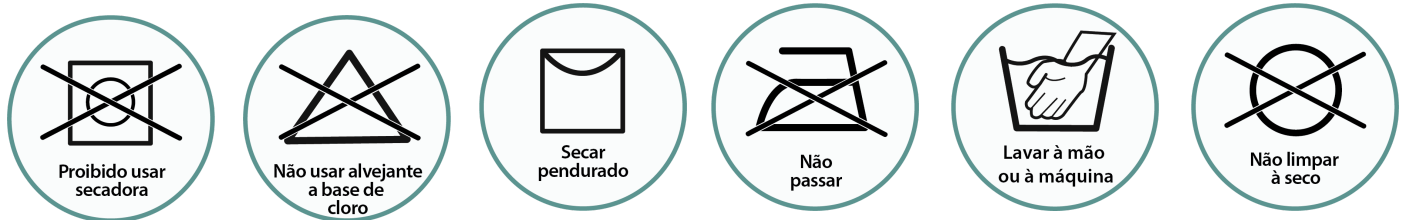

Composição do material

100% PVC

Dicas Importantes

- Utilizar pano de algodão branco, limpo e macio e sabão neutro;
- Para sujeiras pontuais utilizar álcool ou algum limpador multi uso;
- Sobre as etiquetas e imagens em silk screen, não utilizar álcool ou outro produto removedor;
- Em casos de pouca sujeira a divisória pode ser higienizada no local.

Procedimento

Mantenha a divisória esticada, sem removê-la dos trilhos. Aplique o produto sobre o pano limpo sem encharcá-lo, para facilitar a secagem que ocorrerá naturalmente e então passe com movimentos de cima para baixo na divisória para não marcá-la. O mesmo procedimento poderá ser realizado com as faixas. Em casos de alta sujidade há a necessidade da remoção da divisória para um local amplo e limpo.

Garantia

Nossa garantia para defeitos de fabricação é de 3 anos. Desde que sigam as instruções de higienização citadas acima.

Em caso de dúvidas entre em contato com a Br Goods pelo SAC:

sac@brgoods.com.br ou (019) 3934-4600

